



INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I MONTAŻU

1. PRZEZNACZENIE

Uchwyty dla niepełnosprawnych przeznaczone są do podtrzymywania się, pomocy w utrzymaniu równowagi oraz przemieszczaniu się osób korzystających z urządzeń sanitarnych, zwiększając tym samym bezpieczeństwo tych osób. Znajdują zastosowanie w mieszkaniach, domach opieki, szpitalach, placówkach zdrowia, toaletach itp.

2. MOCOWANIE DO PODŁOŻA

Uchwyt można zamocować do podłoża w pozycji poziomej, pionowej, bądź pod kątem w zależności od rodzaju uchwytu oraz potrzeb użytkowników. Do montażu wykorzystaj dołączony zestaw wkrętów, kołków i uszczelnień.

Mocowanie odbywa się za pomocą wkrętów stalowych po uprzednim nawierceniu w podłożu otworów o średnicy odpowiadającej plastikowej części kołka rozporowego i głębokości przekraczającej długość tego kołka w rozstawie odpowiadającym otworom w rozetce. W wywiercone otwory należy wbić plastikowe elementy kołków a między podłoże a uchwyt założyć podkładki plastikowe (uszczelki) zabezpieczające podłoże przed uszkodzeniem.

Wkręty stalowe należy wkręcić do przygotowanych otworów na pełną ich długość we wszystkie otwory przewidziane przez producenta w danym rodzaju uchwytu.

Dołączone do uchwytu wkręty można zastosować do podłoża wykonanego z pełnej cegły, betonu. Do podłoża wykonanego z siporexu, cegły dziurawki, należy stosować wkręty o zwiększonej długości (minimum 80 mm). Nie zaleca się stosowania uchwytów na podłoża wykonane z gips-kartonu lub drewniane o grubości mniejszej niż 50 mm.

Po zamocowaniu uchwytu należy sprawdzić czy zamocowanie go do podłoża posiada odpowiednią wytrzymałość.

Dopuszczalne obciążenie przewidziane przez producenta wynosi 120 kg.

3. UŻYTKOWANIE

W trakcie użytkowania należy systematycznie sprawdzać czy kołki mocujące uchwyt nie zostały obłuzowane. Jeśli podczas użytkowania pojawiają się np. luzy na połączeniach śrubowych należy je zniwelować poprzez ich dokręcenie lub wymianę.

Wyroby nie powinny być dalej użytkowane w sytuacji np. uszkodzenia połączeń spawanych, widocznego wyrywania z podłoża, w którym zostały zamocowane lub uszkodzenia/korozi elementów mocujących

4. DEZYNFEKCJA

Uchwyty są produktem wielokrotnego użytku. W celu zachowania należytego stanu higieny po każdorazowym użyciu należy produkt umyć roztworem łagodnego detergentu (mydło, szampon). Dezynfekować środkami typu Incidin Plus, Incidur, Medi-Sept.

OSTRZEŻENIE:

**ZWRÓĆ UWAGĘ NA RODZAJ PODŁOŻA, DO KTÓREGO MOCUJESZ UCHWYT.
UCHWYT NALEŻY PRZYKRĘCIĆ NA WSZYSTKIE WKRĘTY.**

Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik lub pacjent mają miejsce zamieszkania.

W przypadku poważnego incydentu skonsultuj się również z pracownikiem służby zdrowia.

Corradomed Sp. z o. o.
25-825 Kielce, ul. Dobromyśl 5, NIP: 959-14-82-951
tel. 41 346-47-73, biuro@corradomed.pl

Data wydania instrukcji 05.2025 r.

WARUNKI GWARANCJI

1. Dla potrzeb niniejszego dokumentu:

- „Producent” oznacza firmę Corradomed Sp. z o. o. z siedzibą w Kielcach przy ulicy Dobromyśl 5.
- „Nabywca” oznacza finalnego nabywcę sprzętu wytworzonego przez Producenta.

2. Producent udziela następujących gwarancji licząc od dnia zakupu przez Nabywcę:

- dla wyrobów ze stali węglowej, malowanych proszkowo- 1 rok,
 - dla wyrobów ze stali nierdzewnej kwasoodpornej- 10 lat
3. W ramach uprawnień gwarancyjnych usunięte zostaną wszystkie wady jednoznacznie wynikające z błędów produkcyjnych lub niedoskonałości materiału. Wymienione wadliwe części przechodzą na własność producenta.

4. Producent nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu powstałe w trakcie wykonania usługi transportowej przez firmę przewozową. Obowiązkiem Nabywcy jest sprawdzenie stanu technicznego sprzętu przy jego odbiorze.

Wyrób przed montażem powinien być sprawdzony, w przypadku jakichkolwiek wad nie powinien być montowany.

5. W każdym przypadku gwarancji udzielanej przez Producenta nie podlegają:

- uszkodzenia mechaniczne,
- wady i szkody wynikłe na skutek niewłaściwego zainstalowania wyrobu (niezgodne z instrukcją lub sztuką budowlaną),
- przedwczesne zużycie spowodowane nieprawidłowym montażem,
- uszkodzenia powstałe w związku z nie zastosowaniem się Nabywcy do zaleceń eksploatacyjnych producenta,
- uszkodzenia wynikłe na skutek osadzania się kamienia z wody, niewłaściwej pielęgnacji produktów,
- ingerencje lub zmiany konstrukcyjne dokonane na produktach przez osoby nieupoważnione przez Corradomed Sp. z o.o.

6. Aby skorzystać z uprawnień gwarancyjnych konieczne jest spełnienie łącznie czterech warunków:

- przedstawienie oryginalnej karty gwarancyjnej z podpisem Sprzedawcy i oznaczeniem daty nabycia,
- przedstawienie faktury lub innego dowodu zakupu sprzętu przez Nabywcę,
- zgłoszenie wady w terminie 14 dni od jej wykrycia,
- odesłanie towaru w oryginalnym opakowaniu.

Koszt dostawy sprzętu do punktu sprzedaży ponosi Nabywca. Sprzęt powinien być w oryginalnym opakowaniu fabrycznym dodatkowo zabezpieczonym przed uszkodzeniem. Uszkodzenia spowodowane niedostatecznym zabezpieczeniem wysyłki sprzętu nie podlegają naprawom gwarancyjnym.

7. Producent ma obowiązek ustosunkowania się do żądania klienta i poinformowania go o tym fakcie w terminie 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji do Producenta.

Okres gwarancyjny zostanie wydłużony o czas upływający między dniem zgłoszenia a dniem wykonania naprawy.

W przypadku wymiany towaru na nowy, okres gwarancyjny liczony jest od początku.

Naprawy pogwarancyjne i wiążące się z tym usługi transportowe są odpłatne.

8. Nabywcy przysługuje, według jego wyboru, prawo żądania wymiany sprzętu na nowy lub zwrotu zapłaconej ceny w wypadku, gdy:

- naprawa nie zostanie wykonana w ciągu 14 dni
- po dwukrotnej naprawie uszkodzenia uniemożliwiającego eksploatację, nadal wystąpią usuwane wcześniej wady.

9. Terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej ograniczony jest do terytorium Polski.

10. Gwarancja udzielana na sprzedawany towar nie wyłącza, nie ogranicza i nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

11. Karta gwarancyjna jest ważna jeżeli posiada wpisana datę sprzedaży potwierdzoną pieczęcią firmową jednostki handlowej, podpis sprzedającego oraz rodzaj sprzętu.



INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I MONTAŻU

1. PRZEZNACZENIE

Uchwyty dla niepełnosprawnych przeznaczone są do podtrzymywania się, pomocy w utrzymaniu równowagi oraz przemieszczaniu się osób korzystających z urządzeń sanitarnych, zwiększając tym samym bezpieczeństwo tych osób. Znajdują zastosowanie w mieszkaniach, domach opieki, szpitalach, placówkach zdrowia, toaletach itp.

2. MOCOWANIE DO PODŁOŻA

Uchwyt można zamocować do podłoża w pozycji poziomej, pionowej, bądź pod kątem w zależności od rodzaju uchwytu oraz potrzeb użytkowników. Do montażu wykorzystaj dołączony zestaw wkrętów, kołków i uszczelnień.

Mocowanie odbywa się za pomocą wkrętów stalowych po uprzednim nawierceniu w podłożu otworów o średnicy odpowiadającej plastikowej części kołka rozporowego i głębokości przekraczającej długość tego kołka w rozstawie odpowiadającym otworom w rozetce. W wywiercone otwory należy wbić plastikowe elementy kołków a między podłoże a uchwyt założyć podkładki plastikowe (uszczelki) zabezpieczające podłoże przed uszkodzeniem. Wkręty stalowe należy wkręcić do przygotowanych otworów na pełną ich długość we wszystkie otwory przewidziane przez producenta w danym rodzaju uchwytu.

Dołączone do uchwytu wkręty można zastosować do podłoża wykonanego z pełnej cegły, betonu. Do podłoża wykonanego z siporexu, cegły dziurawki, należy stosować wkręty o zwiększonej długości (minimum 80 mm). Nie zaleca się stosowania uchwytów na podłoża wykonane z gips-kartonu lub drewniane o grubości mniejszej niż 50 mm.

Po zamocowaniu uchwytu należy sprawdzić czy zamocowanie go do podłoża posiada odpowiednią wytrzymałość.

Dopuszczalne obciążenie przewidziane przez producenta wynosi 120 kg.

3. UŻYTKOWANIE

W trakcie użytkowania należy systematycznie sprawdzać czy kołki mocujące uchwyt nie zostały obłuzowane. Jeśli podczas użytkowania pojawiają się np. luzy na połączeniach śrubowych należy je zniwelować poprzez ich dokręcenie lub wymianę.

Wyroby nie powinny być dalej użytkowane w sytuacji np. uszkodzenia połączeń spawanych, widocznego wrywania z podłoża, w którym zostały zamocowane lub uszkodzenia/korozyj elementów mocujących

4. DEZYNFEKCJA

Uchwyty są produktem wielokrotnego użytku. W celu zachowania należytego stanu higieny po każdorazowym użyciu należy produkt umyć roztworem łagodnego detergentu (mydło, szampon). Dezynfekować środkami typu Incidin Plus, Incidur, Medi-Sept.

OSTRZEŻENIE:

**ZWRÓĆ UWAGĘ NA RODZAJ PODŁOŻA, DO KTÓREGO MOCUJESZ UCHWYT.
UCHWYT NALEŻY PRZYKRĘCIĆ NA WSZYSTKIE WKRĘTY.**

Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik lub pacjent mają miejsce zamieszkania.

W przypadku poważnego incydentu skonsultuj się również z pracownikiem służby zdrowia.

Corradomed Sp. z o. o.

25-825 Kielce, ul. Dobromyśl 5, NIP: 959-14-82-951

tel. 41 346-47-73, biuro@corradomed.pl

Data wydania instrukcji 05.2025 r

WARUNKI GWARANCJI

1. Dla potrzeb niniejszego dokumentu:

- „Producent” oznacza firmę Corradomed Sp. z o. o. z siedzibą w Kielcach przy ulicy Dobromyśl 5.
- „Nabywca” oznacza finalnego nabywcę sprzętu wytworzonego przez Producenta.

2. Producent udziela następujących gwarancji licząc od dnia zakupu przez Nabywcę:

- dla wyrobów ze stali węglowej, malowanych proszkowo- 1 rok,
- dla wyrobów ze stali nierdzewnej kwasoodpornej- 10 lat

3. W ramach uprawnień gwarancyjnych usunięte zostaną wszystkie wady jednoznacznie wynikające z błędów produkcyjnych lub niedoskonałości materiału. Wymienione wadliwe części przechodzą na własność producenta.

4. Producent nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu powstałe w trakcie wykonania usługi transportowej przez firmę przewoźową. Obowiązkiem Nabywcy jest sprawdzenie stanu technicznego sprzętu przy jego odbiorze.

Wyrób przed montażem powinien być sprawdzony, w przypadku jakichkolwiek wad nie powinien być montowany.

5. W każdym przypadku gwarancji udzielanej przez Producenta nie podlegają:

- uszkodzenia mechaniczne,
- wady i szkody wynikłe na skutek niewłaściwego zainstalowania wyrobu (niezgodne z instrukcją lub sztuką budowlaną),
- przedwczesne zużycie spowodowane nieprawidłowym montażem,
- uszkodzenia powstałe w związku z nie zastosowaniem się Nabywcy do zaleceń eksploatacyjnych producenta,
- uszkodzenia wynikłe na skutek osadzania się kamienia z wody, niewłaściwej pielęgnacji produktów,
- ingerencje lub zmiany konstrukcyjne dokonane na produktach przez osoby nieupoważnione przez Corradomed Sp. z o.o.

6. Aby skorzystać z uprawnień gwarancyjnych konieczne jest spełnienie łącznie czterech warunków:

- przedstawienie oryginalnej karty gwarancyjnej z podpisem Sprzedawcy i oznaczeniem daty nabycia,
- przedstawienie faktury lub innego dowodu zakupu sprzętu przez Nabywcę,
- zgłoszenie wady w terminie 14 dni od jej wykrycia,
- odesłanie towaru w oryginalnym opakowaniu.

Koszt dostawy sprzętu do punktu sprzedaży ponosi Nabywca. Sprzęt powinien być w oryginalnym opakowaniu fabrycznym dodatkowo zabezpieczonym przed uszkodzeniem. Uszkodzenia spowodowane niedostatecznym zabezpieczeniem wysyłki sprzętu nie podlegają naprawom gwarancyjnym.

7. Producent ma obowiązek ustosunkowania się do żądania klienta i poinformowania go o tym fakcie w terminie 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji do Producenta.

Okres gwarancyjny zostanie wydłużony o czas upływający między dniem zgłoszenia a dniem wykonania naprawy.

W przypadku wymiany towaru na nowy, okres gwarancyjny liczony jest od początku.

Naprawy pogwarancyjne i wiążące się z tym usługi transportowe są odpłatne.

8. Nabywcy przysługuje, według jego wyboru, prawo żądania wymiany sprzętu na nowy lub zwrotu zapłaconej ceny w wypadku, gdy:

- naprawa nie zostanie wykonana w ciągu 14 dni
- po dwukrotnej naprawie uszkodzenia uniemożliwiającego eksploatację, nadal wystąpią usuwane wcześniej wady.

9. Terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej ograniczony jest do terytorium Polski.

10. Gwarancja udzielana na sprzedawany towar nie wyłącza, nie ogranicza i nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

11. Karta gwarancyjna jest ważna jeżeli posiada wpisana datę sprzedaży potwierdzoną pieczęcią firmową jednostki handlowej, podpis sprzedającego oraz rodzaj sprzętu.