

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I MONTAŻU KRZESEŁKA PRYSZNICOWEGO UCHYLNEGO KPU, KPU NOGA, KPU-2, KPU-2 NOGA, KPU-2 PU, KPU-2 PVC, KPU-O

1. PRZEZNACZENIE

Krzesiśko prysznicowe uchylne przeznaczony jest do użytkowania w szpitalach, mieszkaniach, itp. Zastosowanie krzesiśka przy prysznicach ułatwia osobie niepełnosprawnej korzystanie z urządzeń sanitarnych jak również ułatwia utrzymanie higieny oraz codziennej toalety i w znacznym stopniu zwiększa bezpieczeństwo osób niepełnosprawnych korzystających z tych węzłów sanitarnych. Wyrób nie jest odpowiedni dla osób, które nie są w stanie kontrolować równowagi podczas siedzenia.

2. MOCOWANIE DO PODŁOŻA

Krzesiśko należy zamocować do podłóży w pozycji poziomej. Mocowanie odbywa się za pomocą wkrętów po uprzednim nawierceniu w podłóży otworów o średnicy odpowiadającej plastikowej części kołka rozporowego i głębokości przekraczającej długość tego kołka w rozstawie odpowiadającym otworom w konstrukcji mocującej. W wywiercone otwory należy wbić plastikowe elementy kołków. Wkręty stalowe należy wkręcić do przygotowanych otworów na pełną ich długość we wszystkie otwory przewidziane przez producenta w krzesiśku prysznicowym. Dołączone do krzesiśka wkręty można zastosować do podłóży wykonanego z pełnej cegły, betonu. Do podłóży wykonanego z siporexu, cegły dziurawki należy stosować wkręty o zwiększonej długości (minimum 80 mm). Nie zaleca się stosowania krzesiśka na podłóży wykonane z gips-kartonu lub drewniane o grubości mniejszej niż 50 mm. Po zamocowaniu krzesiśka do podłóży zabezpieczyć łby wkrętów plastikowymi osłonami dołączonymi do zestawu montażowego. Po zamontowaniu krzesiśka należy sprawdzić czy zamocowanie go do podłóży posiada odpowiednią wytrzymałość.

Dopuszczalne obciążenie przewidziane przez producenta wynosi 120 kg (dla krzesiśka z nogą – 150 kg)

Wyrób należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi warunkami utylizacji.

OSTRZEŻENIE: Wyróby nie powinny być dalej użytkowane w sytuacji np. uszkodzenia połączeń spawanych, widocznego wyrywania z podłóży, w którym zostały zamocowane lub uszkodzenia/korozji elementów.
Nie stawaj na wyróbie.

3. DEZYNFEKCJA

Krzesiśko jest produktem wielokrotnego użytku. W celu zachowania należytego stanu higieny po każdorazowym użyciu należy produkt umyć roztworem łagodnego detergentu (mydło, szampon) Dezynfekować środkami typu Incidin Plus, Incidur, Medi-Sept.

OSTRZEŻENIE:

**ZWRÓĆ UWAGĘ NA RODZAJ PODŁOŻA DO, KTÓREGO MOCUJESZ KRZESEŁKO.
KRZESEŁKO NALEŻY PRZYKRĘCIĆ NA WSZYSTKIE WKRETY.**

Każdy poważny incydent związany z wyróblem należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik lub pacjent mają miejsce zamieszkania. W przypadku poważnego incydentu skonsultuj się również z pracownikiem służby zdrowia.

Corradomed Sp. z o.o.

25-825 Kielce, ul. Dobromyśl 5, NIP: 959-14-82-951

Data wydania instrukcji 05.2025 r.

tel. 41 346-47-73, biuro@corrado**med**.pl

1. Dla potrzeb niniejszego dokumentu:

• „Producent” oznacza firmę CORRADOMED Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, przy ulicy Dobromyśl 5.

• „Nabywca” oznacza finalnego nabywcę sprzętu wytworzonego przez Producenta.

2. Producent udziela następujących gwarancji licząc od dnia zakupu przez Nabywcę:

• dla wyróbów ze stali węglowej, malowanych proszkowo – 1 rok,

• dla wyróbów ze stali nierdzewnej kwasoodpornej – 10 lat,

3. W ramach uprawnień gwarancyjnych usunięte zostaną wszystkie wady jednoznacznie wynikające z błędów produkcyjnych lub niedoskonałości materiału. Wymienione wadliwe części przechodzą na własność producenta.

4. Producent nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu powstałe w trakcie wykonania usługi transportowej przez firmę przewoźową. Obowiązkiem Nabywcy jest sprawdzenie stanu technicznego sprzętu przy jego odbiorze.

Wyrób przed montażem powinien być sprawdzony, w przypadku jakichkolwiek wad nie powinien być montowany.

5. W każdym przypadku gwarancji udzielanej przez Producenta nie podlegają:

• uszkodzenia mechaniczne,

• wady i szkody wynikłe na skutek niewłaściwego zainstalowania wyrobu (niezgodne z instrukcją lub sztuką budowlaną),

• przedwczesne zużycie spowodowane nieprawidłowym montażem,

• uszkodzenia powstałe w związku z nie zastosowaniem się Nabywcy do zaleceń eksploatacyjnych producenta,

• uszkodzenia wynikłe na skutek osadzania się kamienia z wody, niewłaściwej pielęgnacji produktów, ingerencje lub zmiany konstrukcyjne dokonane na produktach przez osoby nieupoważnione przez CORRADOMED Sp. z o.o..

6. Aby skorzystać z uprawnień gwarancyjnych konieczne jest spełnienie łącznie czterech warunków:

• przedstawienie oryginalnej karty gwarancyjnej z podpisem Sprzedawcy i oznaczeniem daty nabycia,

• przedstawienie faktury lub innego dowodu zakupu sprzętu przez Nabywcę,

• zgłoszenie wady w terminie 14 dni od jej wykrycia,

• odesłanie towaru w oryginalnym opakowaniu.

Koszt dostawy sprzętu do punktu sprzedaży ponosi Nabywca. Sprzęt powinien być w oryginalnym opakowaniu fabrycznym dodatkowo zabezpieczonym przed uszkodzeniem. Uszkodzenia spowodowane niedostatecznym zabezpieczeniem wysyłki sprzętu nie podlegają naprawom gwarancyjnym.

7. Producent ma obowiązek ustosunkowania się do żądania klienta i poinformowania go o tym fakcie w terminie 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji do Producenta.

Okres gwarancyjny zostanie wydłużony o czas upływający między dniem zgłoszenia a dniem wykonania naprawy.

W przypadku wymiany towaru na nowy, okres gwarancyjny liczony jest od początku.

Naprawy pogwarancyjne i wiążące się z tym usługi transportowe są odpłatne.

8. Nabywcy przysługuje, według jego wyboru, prawo żądania wymiany sprzętu na nowy lub zwrotu zapłaconej ceny w wypadku, gdy:

• naprawa nie zostanie wykonana w ciągu 14 dni,

• po dwukrotnej naprawie uszkodzenia uniemożliwiającego eksploatację, nadal wystąpią usuwane wcześniej wady.

9. Terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej ograniczony jest do terytorium Polski.

10. Gwarancja udzielana na sprzedawany towar nie wyłącza, nie ogranicza i nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

11. Karta gwarancyjna jest ważna jeżeli posiada wpisana datę sprzedaży potwierdzoną pieczęcią firmową jednostki handlowej, podpis sprzedającego oraz rodzaj sprzętu.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I MONTAŻU KRZESEŁKA PRYSZNICOWEGO UCHYLNEGO KPU, KPU NOGA, KPU-2, KPU-2 NOGA, KPU-2 PU, KPU-2 PVC, KPU-O

1. PRZEZNACZENIE

Krzesiśko prysznicowe uchylne przeznaczony jest do użytkowania w szpitalach, mieszkaniach, itp. Zastosowanie krzesiśka przy prysznicach ułatwia osobie niepełnosprawnej korzystanie z urządzeń sanitarnych jak również ułatwia utrzymanie higieny oraz codziennej toalety i w znacznym stopniu zwiększa bezpieczeństwo osób niepełnosprawnych korzystających z tych węzłów sanitarnych. Wyrób nie jest odpowiedni dla osób, które nie są w stanie kontrolować równowagi podczas siedzenia.

2. MOCOWANIE DO PODŁOŻA

Krzesiśko należy zamocować do podłóży w pozycji poziomej. Mocowanie odbywa się za pomocą wkrętów po uprzednim nawierceniu w podłóży otworów o średnicy odpowiadającej plastikowej części kołka rozporowego i głębokości przekraczającej długość tego kołka w rozstawie odpowiadającym otworom w konstrukcji mocującej. W wywiercone otwory należy wbić plastikowe elementy kołków. Wkręty stalowe należy wkręcić do przygotowanych otworów na pełną ich długość we wszystkie otwory przewidziane przez producenta w krzesiśku prysznicowym.

Dołączone do krzesiśka wkręty można zastosować do podłóży wykonanego z pełnej cegły, betonu. Do podłóży wykonanego z siporexu, cegły dziurawki należy stosować wkręty o zwiększonej długości (minimum 80 mm). Nie zaleca się stosowania krzesiśka na podłóży wykonane z gips-kartonu lub drewniane o grubości mniejszej niż 50 mm. Po zamocowaniu krzesiśka do podłóży zabezpieczyć łby wkrętów plastikowymi osłonami dołączonymi do zestawu montażowego. Po zamontowaniu krzesiśka należy sprawdzić czy zamocowanie go do podłóży posiada odpowiednią wytrzymałość.

Dopuszczalne obciążenie przewidziane przez producenta wynosi 120 kg (dla krzesiśka z nogą – 150 kg)

Wyrób należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi warunkami utylizacji.

OSTRZEŻENIE: Wyroby nie powinny być dalej użytkowane w sytuacji np. uszkodzenia połączeń spawanych, widocznego wyrywania z podłóży, w którym zostały zamocowane lub uszkodzenia/korozji elementów.
Nie stawaj na wyrobie.

3. DEZYNFEKCJA

Krzesiśko jest produktem wielokrotnego użytku. W celu zachowania należytego stanu higieny po każdorazowym użyciu należy produkt umyć roztworem łagodnego detergentu (mydło, szampon)
Dezynfekować środkami typu Incidin Plus, Incidur, Medi-Sept.

OSTRZEŻENIE:
ZWRÓĆ UWAGĘ NA RODZAJ PODŁÓŻA DO, KTÓREGO MOCUJESZ KRZESEŁKO.
KRZESEŁKO NALEŻY PRZYKRĘCIĆ NA WSZYSTKIE WKRETY.

Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik lub pacjent mają miejsce zamieszkania. W przypadku poważnego incydentu skonsultuj się również z pracownikami służby zdrowia.

Corradomed Sp. z o.o.

25-825 Kielce, ul. Dobromyśl 5, NIP: 959-14-82-951

Data wydania instrukcji 05.2025 r.

tel. 41 346-47-73, biuro@corrado**med**.pl

1. Dla potrzeb niniejszego dokumentu:

- „Producent” oznacza firmę CORRADOMED Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, przy ulicy Dobromyśl 5.
 - „Nabywca” oznacza finalnego nabywcę sprzętu wytworzonego przez Producenta.
2. Producent udziela następujących gwarancji licząc od dnia zakupu przez Nabywcę:
- dla wyrobów ze stali węglowej, malowanych proszkowo – 1 rok,
 - dla wyrobów ze stali nierdzewnej kwasoodpornej – 10 lat,
3. W ramach uprawnień gwarancyjnych usunięte zostaną wszystkie wady jednoznacznie wynikające z błędów produkcyjnych lub niedoskonałości materiału. Wymienione wadliwe części przechodzą na własność producenta.
4. Producent nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu powstałe w trakcie wykonania usługi transportowej przez firmę przewoźową. Obowiązkiem Nabywcy jest sprawdzenie stanu technicznego sprzętu przy jego odbiorze.

Wyrób przed montażem powinien być sprawdzony, w przypadku jakichkolwiek wad nie powinien być montowany.

5. W każdym przypadku gwarancji udzielanej przez Producenta nie podlegają:

- uszkodzenia mechaniczne,
- wady i szkody wynikłe na skutek niewłaściwego zainstalowania wyrobu (niezgodne z instrukcją lub sztuką budowlaną),
- przedwczesne zużycie spowodowane nieprawidłowym montażem,
- uszkodzenia powstałe w związku z nie zastosowaniem się Nabywcy do zaleceń eksploatacyjnych producenta,
- uszkodzenia wynikłe na skutek osadzania się kamienia z wody, niewłaściwej pielęgnacji produktów,
- ingerencje lub zmiany konstrukcyjne dokonane na produktach przez osoby nieupoważnione przez CORRADOMED Sp. z o.o..

6. Aby skorzystać z uprawnień gwarancyjnych konieczne jest spełnienie łącznie czterech warunków:

- przedstawienie oryginalnej karty gwarancyjnej z podpisem Sprzedawcy i oznaczeniem daty nabycia,
- przedstawienie faktury lub innego dowodu zakupu sprzętu przez Nabywcę,
- zgłoszenie wady w terminie 14 dni od jej wykrycia,
- odesłanie towaru w oryginalnym opakowaniu.

Koszt dostawy sprzętu do punktu sprzedaży ponosi Nabywca. Sprzęt powinien być w oryginalnym opakowaniu fabrycznym dodatkowo zabezpieczonym przed uszkodzeniem. Uszkodzenia spowodowane niedostatecznym zabezpieczeniem wysyłki sprzętu nie podlegają naprawom gwarancyjnym.

7. Producent ma obowiązek ustosunkowania się do żądania klienta i poinformowania go o tym fakcie w terminie 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji do Producenta.

Okres gwarancyjny zostanie wydłużony o czas upływający między dniem zgłoszenia a dniem wykonania naprawy.

W przypadku wymiany towaru na nowy, okres gwarancyjny liczony jest od początku.

Naprawy pogwarancyjne i wiążące się z tym usługi transportowe są odpłatne.

8. Nabywcy przysługuje, według jego wyboru, prawo żądania wymiany sprzętu na nowy lub zwrotu zapłaconej ceny w wypadku, gdy:

- naprawa nie zostanie wykonana w ciągu 14 dni,
- po dwukrotnej naprawie uszkodzenia uniemożliwiającego eksploatację, nadal wystąpią usuwane wcześniej wady.

9. Terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej ograniczony jest do terytorium Polski.

10. Gwarancja udzielana na sprzedawany towar nie wyłącza, nie ogranicza i nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

11. Karta gwarancyjna jest ważna jeżeli posiada wpisaną datę sprzedaży potwierdzoną pieczęcią firmową jednostki handlowej, podpis sprzedającego oraz rodzaj sprzętu.