



## Uchwyt uchylny do toalety dla niepełnosprawnych z podparciem (nogą) 50cm - biały, 32mm

Producent: Corradomed

Nr referencyjny: UUWC-5 NOGA

### Cechy produktu

Długość (cm)	50 cm
Średnica uchwytu	32mm
Maksymalne obciążenie (kg)	150
Typ uchwytu	Uchylny
Kolor uchwytu	Biały
Sposób montażu	Przykręcany
Maskownice	Nie
Materiał	Stal węglowa malowana proszkowo
Gwarancja	12 miesięcy
Stan dla braku w magazynie	1 oczekiwanie na dostawę 21-30 dni roboczych
Podparcie podłogowe	Tak

### Opis produktu

## Uchwyt uchylny 50cm z podparciem dla osób niepełnosprawnych

### Poręcz uchylna z nogą, ułatwiająca korzystanie z WC - opis produktu

Uchwyty uchylne z dodatkową podporą do WC to ogromne udogodnienie przede wszystkim dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku. Ich zadaniem jest przede wszystkim **ułatwienie transferu metodą boczną z wózka na sedes**, z dowolnej strony. Sprawdzą się także jako punkty podparcia dla osób o mniejszej sprawności fizycznej, borykających się z problemami z poruszaniem się, wstawaniem i siadaniem, np. na skutek wypadków lub przebytych operacji.

Montaż poręczy uchylnej pozwala podnieść bezpieczeństwo użytkownika oraz komfort wykonywania codziennych czynności. **Pomoże utrzymać równowagę, podeprzeć się czy usiąść.** Możliwość składania jest bardzo praktyczna, umożliwia oszczędzenie miejsca w łazience oraz wygodniejsze korzystanie z toalety.

Uchwyty uchylne spotykane są najczęściej w miejscach użyteczności publicznej, placówkach zdrowia i opieki, domach pomocy społecznej, ale z powodzeniem można z nich korzystać także w mieszkaniach.

Poręcze opuszczane z naszej oferty zostały wykonane z wysokogatunkowych, solidnych oraz bezpiecznych dla zdrowia materiałów. Potwierdza to **atest wydany przez Państwowy Zakład Higieny**. W zestawie z uchwytem uchylnym klient otrzymuje komplet montażowy, który pozwala trwale zamontować uchwyt na ścianie. Maksymalne dopuszczalne obciążenie, dzięki zastosowaniu dodatkowej nogi podpierającej, **wynosi 150kg**.

Jakość wykonania stoi na wysokim poziomie – **uchwyty są gładkie i przyjemne w dotyku**. Do produkcji zastosowano stal węglową malowaną proszkowo na kolor biały. Gładka powierzchnia uchwytu ogranicza gromadzenie się zanieczyszczeń oraz ułatwia pielęgnację. Uchwyt prosty może być także dezynfekowany za pomocą takich środków jak Incidin Plus, Incidur, Medi-Sept.

Poręcze uchylne wolnostojące dla osób niepełnosprawnych występują w wielu długościach, o średnicy 25 lub 32mm. Uchwyty o większej średnicy będą wygodniejsze w użytkowaniu dla osób o dużych dłoniach.

### Jaki uchwyt do WC dla osoby niepełnosprawnej wybrać?

Wyposażając domową strefę WC można zamontować uchwyty według własnych preferencji, możliwości i potrzeb. Przed podjęciem decyzji warto dokładnie przemyśleć umiejscowienie uchwytów oraz odpowiedzieć sobie na pytanie o problemy, które uchwyty mają rozwiązywać. Uchwyty uchylne pomogą przede wszystkim siadać oraz wstawać z sedesu (w przypadku osób starszych) lub przesiąść się z wózka. Nie powinny być zbyt duże, aby nie ograniczały wolnej przestrzeni w łazience i umożliwiały swobodne przemieszczanie się. Wybierając uchwyt uchylny do WC należy pamiętać o:

- Zmierzeniu długości miski sedesowej,
- Dobraniu poręczy uchylnej która będzie wystawać 15cm przed krawędź miski,
- Górna krawędź pochwyty powinna znajdować się 28cm nad krawędzią deski sedesowej,
- Sprawdzeniu podłoża, do którego uchwyt ma zostać zamontowany,
- Doborze uchwytu, który zapewni maksymalne bezpieczeństwo.

**Najważniejsze zalety poręczy uchylnej dla osoby niepełnosprawnej:**

- Możliwość składania umożliwiająca transfer metodą boczną i oszczędzanie miejsca w łazience,
- **Gotowy do montażu uchwyt (zestaw montażowy w komplecie),**
- Gładka powierzchnia i brak ostrych krawędzi,
- Łatwość utrzymania w czystości, możliwość dezynfekcji,
- Wysoka jakość wykonania i **bezpieczeństwo potwierdzone atestem PZH oraz certyfikatami,**
- Trwała, solidna konstrukcja gwarantująca wieloletnie użytkowanie,
- Bezpieczeństwo – wytrzymałość do 150kg,
- **12-miesięczna gwarancja producenta,**
- Instrukcja montażu w zestawie.

**Produkt jest wyrobem medycznym. Dla bezpieczeństwa używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.**